


MRSA-Screening mittels PCR

Entnahme des Abstrichs nur mit diesem speziellen Doppelabstrichtupfer (rot).

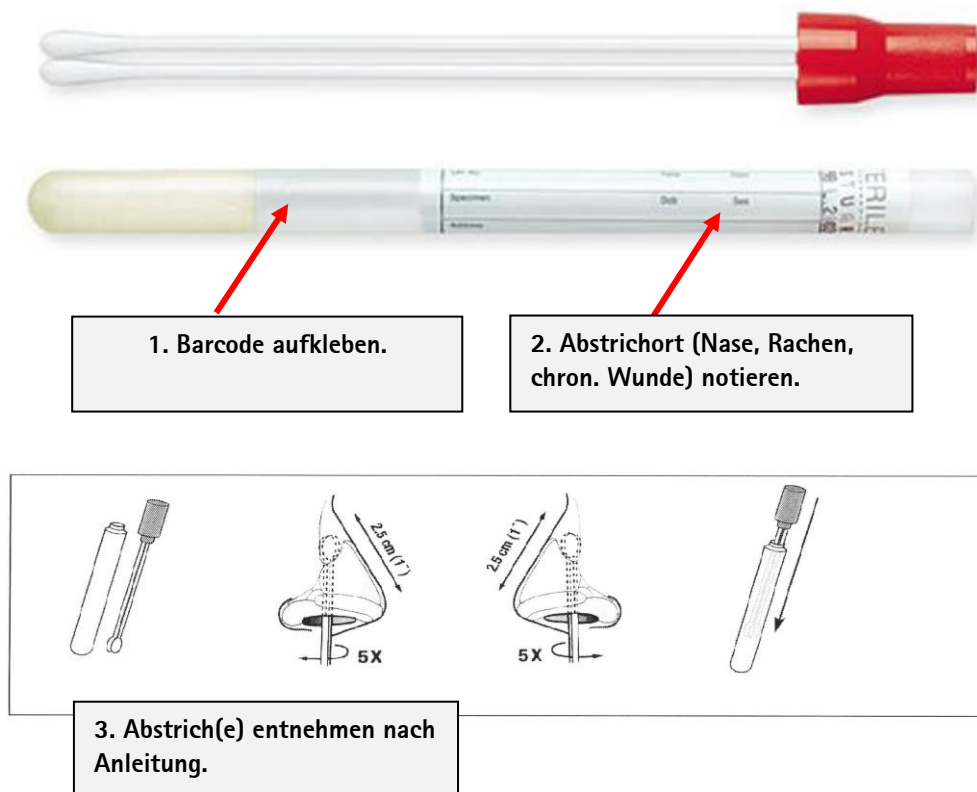

Anleitung:

- Tupferspitze ca. 2, 5 cm tief auf einer Seite in die Nase einführen; durch rotierende Bewegung 5x kreisend Material entnehmen.
- Tupferspitze auf der anderen Nasenseite erneut einführen; rotierende Bewegung wiederholen.
- Tupfer in steriles Transportgefäß stecken und auf schnellstem Weg ins Labor bringen.